



ПРАВИЛА СДАЧИ ТЕСТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТРА АНТИТЕЛ К ВИРУСУ БЕШЕНСТВА

1. Животное обязательно должно быть **ЧИПИРОВАНО!**
2. В день чипирования либо позже животное должно быть вакцинировано против бешенства.
3. Тест проводится не ранее, чем **через 30 дней** после последней вакцинации против бешенства и **за 2 месяца** до окончания срока действия вакцины.
4. Возраст животного должен быть не менее **4х месяцев**.
5. Обязательно наличие пакета сопроводительных документов:
Направление на исследование (*ФИО владельца и кличка животного должны быть заполнены на русском и английском языке*), копия ветеринарного паспорта животного и копия загранпаспорта владельца.

На исследование берется **сыворотка**, которую получают после взятия венозной крови в сухие, чистые, одноразовые пробирки **без антикоагулянта**, отстаивания и центрифугирования полученного биоматериала.

Пробирка должна быть герметично закрыта, промаркирована (указана кличка животного), опечатана и отправлена с пакетом сопроводительных документов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СЫВОРОТКИ:

1. Максимальный срок хранения сыворотки при температуре +2°C...+8°C не более 2х суток.
2. При необходимости хранения более 2х суток, сыворотку замораживают при температуре -20°C.
3. Сыворотка крови не должна подвергаться размораживанию.

К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ:

- цельная кровь или образцы с примесью форменных элементов крови
- сыворотки крови с сильным гемолизом (темно-красного цвета)
- сыворотки крови с осадком, с гнилостным запахом
- сыворотка крови с признаками хилеза (мутная, белого цвета)